



Scheda tecnica del prodotto AllegraMask®

1. Destinazione d'uso

FAIST AllegraMask® è un dispositivo che protegge dalla trasmissione per via aerea di malattie infettive. AllegraMask® costituisce una barriera tra l'utente e terzi riducendo così l'eventuale trasferimento di goccioline (droplet) emesse durante la normale respirazione. Se necessario è possibile indossare una mascherina chirurgica sotto AllegraMask® per ridurre ulteriormente il rischio di infezione.

FAIST AllegraMask®, pur non costituendo una protezione totale, riduce sensibilmente la trasmissione di batteri e agenti patogeni derivante dal contatto con naso e bocca.

FAIST AllegraMask® può essere utilizzata quando non è possibile indossare una mascherina chirurgica per motivi di salute (ad esempio in caso di capacità respiratoria ridotta).

FAIST AllegraMask® può essere utilizzata anche in situazioni in cui la visibilità e le espressioni del volto sono importanti, ad esempio nell'assistenza e comunicazione con non udenti e/o persone con disabilità cognitive/fisiche.

FAIST AllegraMask® è utile anche in casi in cui è necessario limitare il contatto con la cute del viso, ad esempio in caso di acne.

AllegraMask® è un dispositivo ad uso privato, professionale e di altro tipo.

2. Modo d'uso

AllegraMask® si indossa come un paio di occhiali e protegge naso e bocca grazie alla sua visiera. Nel caso in cui la suddetta area non venisse coperta mandare segnalazione al produttore. Pulire il dispositivo al primo utilizzo.

3. Sicurezza e Controindicazioni

Per la sicurezza propria e di terzi seguire le seguenti indicazioni:

- **ATTENZIONE:** pulire AllegraMask® al primo utilizzo
- Utilizzare solo pezzi di ricambio originali
- **ATTENZIONE:** non adatto a bambini e neonati poiché il dispositivo è costituito da parti piccole che potrebbero essere ingerite
- **ATTENZIONE:** non costituisce dispositivo chirurgico pertanto non adatta all'utilizzo in tale campo. Può però essere utilizzata come protezione aggiuntiva
- Non garantisce protezione totale dalla trasmissione per via aerea di malattie infettive. Pertanto si consiglia di osservare le misure di protezione aggiuntive mantenendo le distanze e igienizzando correttamente le mani
- Pulire o disinfettare la mascherina dopo ogni utilizzo
- **ATTENZIONE:** la mascherina è fornita di cordino. In caso di forte trazione le astine e il cordino tenderanno a disassemblarsi.
- **Materiali:** AllegraMask® è composta di materiali non nocivi alla salute. Tuttavia nel caso in cui l'utente dovesse riscontrare reazioni allergiche, difficoltà respiratorie e/o danni alla cute del viso interrompere l'utilizzo e contattare il produttore.
- AllegraMask® non è un dispositivo di sicurezza sul lavoro pertanto non offre protezione da urti, schegge o impatti meccanici e altro
- Nel caso in cui si riscontrassero danni alla visiera, quali graffi, incrinature, cambiamenti di forma e/o colore non utilizzare il prodotto. AllegraMask® può subire alterazioni visibili se esposta a sostanze chimiche, oli o grassi, calore estremo o al sole
- Nel caso di utilizzo di spray anti appannamento e anti statici ricorrere solo ed esclusivamente a prodotti raccomandati dal produttore (vedi anche punto 5)
- Il produttore consiglia un utilizzo senza interruzioni di AllegraMask® di un massimo di due ore. In caso di disagio dovuto a tempi di utilizzo più prolungati sospendere l'uso.

4. Pulizia e disinfezione

Si prega di pulire o disinfettare la mascherina dopo ogni utilizzo.

4.1 Pulizia

Lavare tutte le parti con acqua calda usando una soluzione di sapone o un detergente alcalino, quindi risciacquare sotto acqua corrente per eliminare eventuali residui. Non utilizzare spazzole dure o sostanze abrasive che possano danneggiare le superfici

4.2 Disinfezione

Tutte le parti possono essere disinfettate utilizzando prodotti adatti ai materiali di cui è costituito il prodotto, indicati al punto 7. Si prega di seguire le indicazioni del produttore sulla frequenza e la modalità di disinfezione

5. Agenti anti appannamento e antistatici

È possibile utilizzare solo prodotti anti appannamento e antistatici indicati dal produttore (vedi punto 9). Pertanto osservare anche le istruzioni al punto 3

6. Dati tecnici/uso e conservazione del prodotto

Temperatura di stoccaggio: da -40°C a 60°C

Temperatura di utilizzo: da -18°C a 50°C

Tempi di utilizzo: si consiglia di indossare AllegraMask® per un massimo di due ore consecutive

Conservazione: si consiglia di riporre AllegraMask® in un sacchetto di cotone. Non esporre ai raggi del sole.

7. Materiali

I componenti in plastica possono contenere ftalati (vedi etichetta). Non utilizzare in caso di gravidanza e allattamento. Non adatto a bambini e neonati

1	Astine	MABS
2	Nasello	SEBS
3	Visiera	PC
4	Cordino	COTONE

8. Garanzia

In conformità con le disposizioni del produttore la garanzia del prodotto ha durata di un anno. Il produttore garantisce da difetti di fabbricazione o materiali a partire dalla data di acquisto solo se comprovato da relativa prova di acquisto

9. Pezzi di ricambio/accessori

- Astine
- Visiera
- Nasello
- Cordino
- Spray anti appannamento VisioClear o Bosh (per indicazioni sull'uso vedere punto 5)

10. Scarico di responsabilità

Le informazioni qui riportate hanno lo scopo di essere una linea guida del prodotto in relazione alle necessarie precauzioni di sicurezza e si basano sullo stato attuale delle conoscenze del produttore, pertanto non costituiscono rapporto giuridico contrattuale. L'azienda produttrice non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati da manipolazione o uso differente da quanto sopra indicato.

11. Spiegazione dei simboli

	Non contiene latex		Non esporre a fonti di calore o luce
	Non riutilizzabile		Numero d'ordine
	Seguire le istruzioni		Nome del lotto
	Da consumarsi preferibilmente (data)		Contiene ftalati
	Prodotto il		Senza ftalati



FAIST Systeme GmbH

Daimlerstr. 3 | D - 86836 Untermeitingen

E-Mail: allegramask@FAISTlightmetals.com | www.allegramask.com

Fon +49 (0) 8232 9638 47 | Fax +49 (0) 8232 9638 24

Conformità ai sensi della direttiva CE 93/42 / CEE, allegato VII